




Ритейлер в Беларуси - ООО "Медицинские технологии и сервис"
220015, г. Минск, ул. Пономаренко 35а, оф.037
+375 17 207 13 67 (Тел/факс) +375 33 345 18 59 (MTS)
+375 29 593 48 56 (Velcom) e-mail: info@medte.by
medte.by


Evolution® **Стент с контролируемым раскрытием**

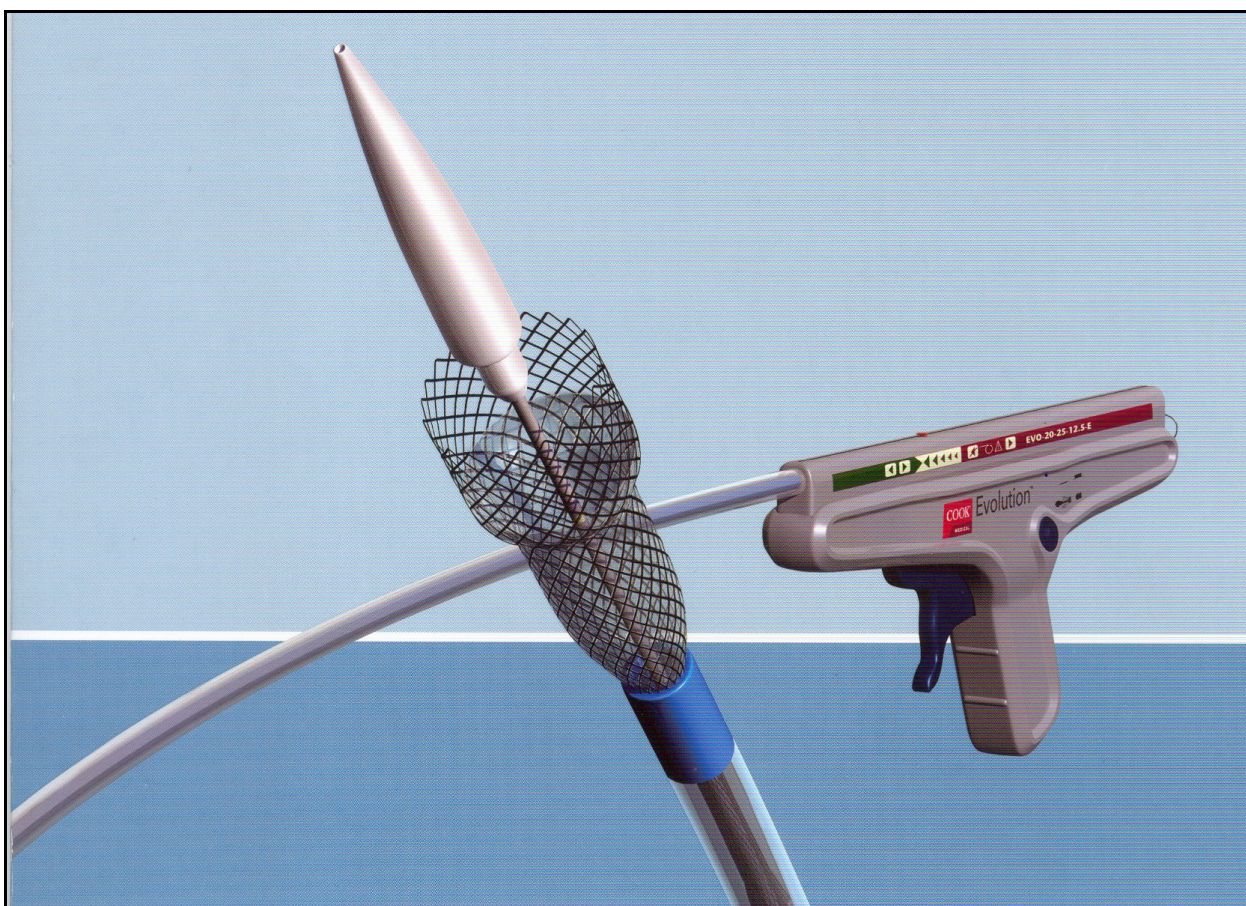

Больше контроля, меньше стресса


Эволюционный дизайн

Стент снаружи и изнутри покрыт силиконовой мембраной, что защищает его от прорастания опухолевой тканью, а также облегчает прохождение пищи через его просвет. Непокрытые проксимальный и дистальный концы позволяют плотно фиксироваться стенту к стенкам пищевода и предотвращают его миграцию, а лассо, расположенное на проксимальном конце, позволяет при необходимости подтянуть стент вверх после его раскрытия.

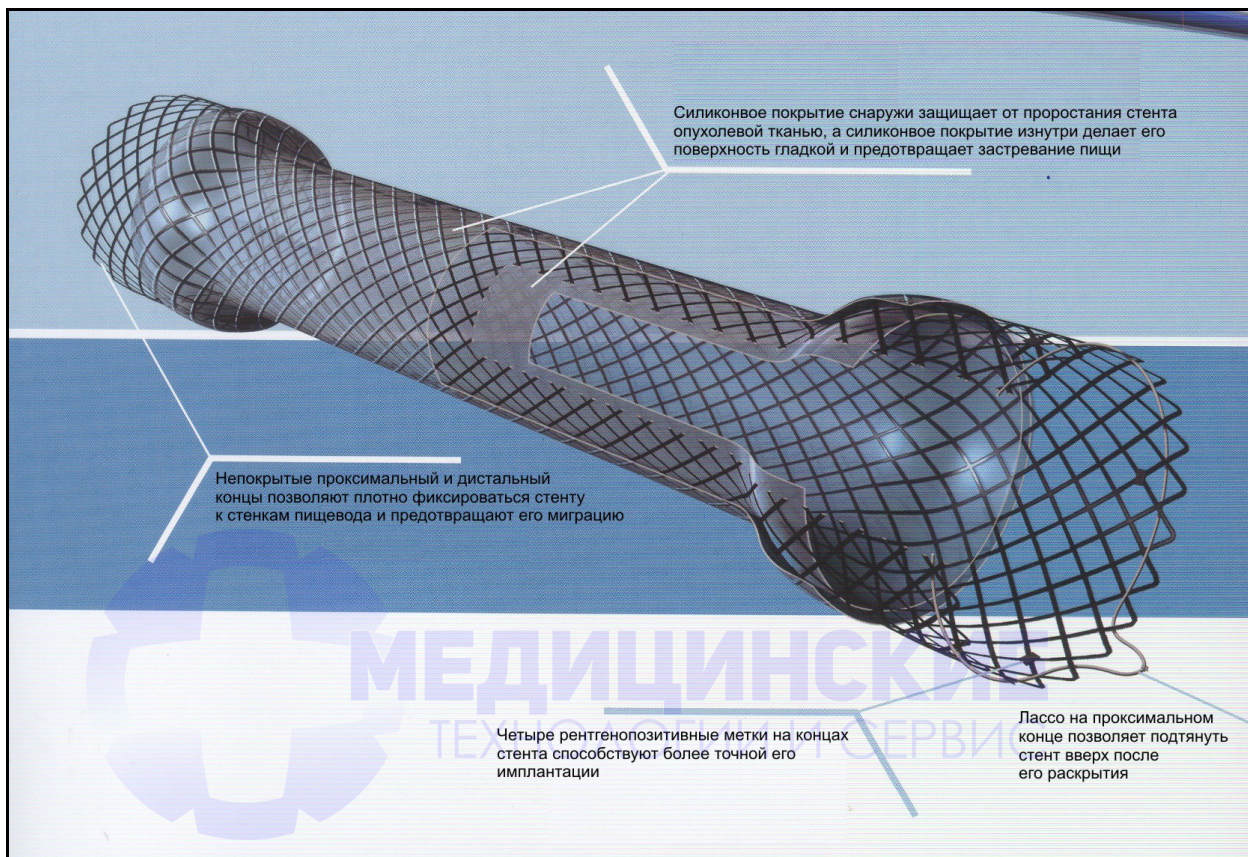



Эволюционный контроль

Держа рукоятку одной рукой и сжимая курок, вы полностью контролируете процесс раскрытия стента с возможностью, до определенного момента, его обратного закрытия. Раскрытие и закрытие стента регулируется простым нажатием направляющей кнопкой. На рукоятке имеется метка, пройдя которую, обратное закрытие стента становится невозможным.

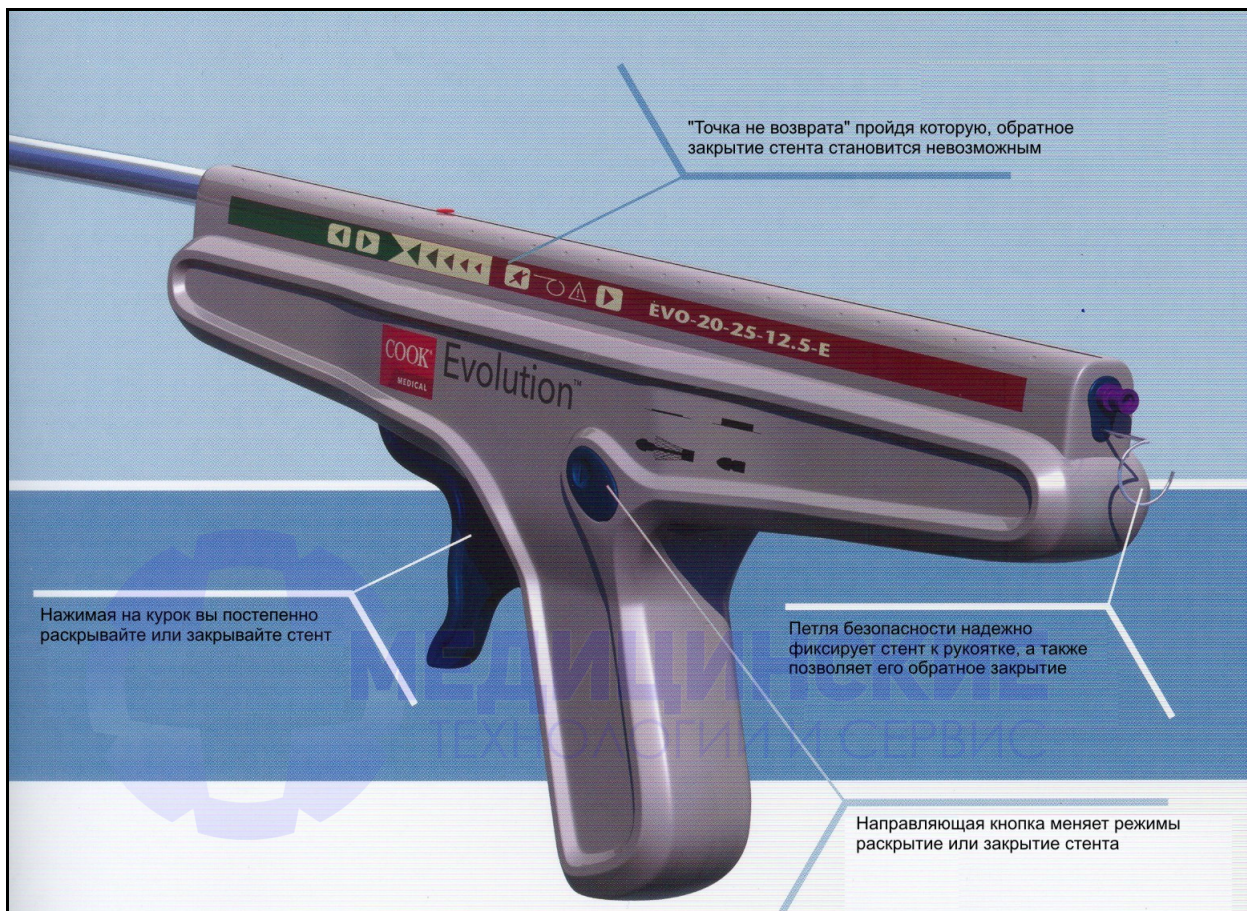


Эволюционная надежность


Максимальный контроль над процессом имплантации стента с меньшей затратой ваших эмоциональных сил - одна из основных задач создания данного уникального устройства. Теперь вы можете с непревзойденной точностью имплантировать стент, а при необходимости закрыть его вновь, имея еще один шанс его удачной имплантации.

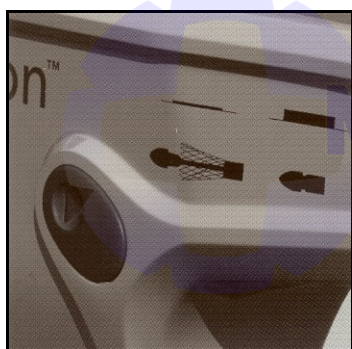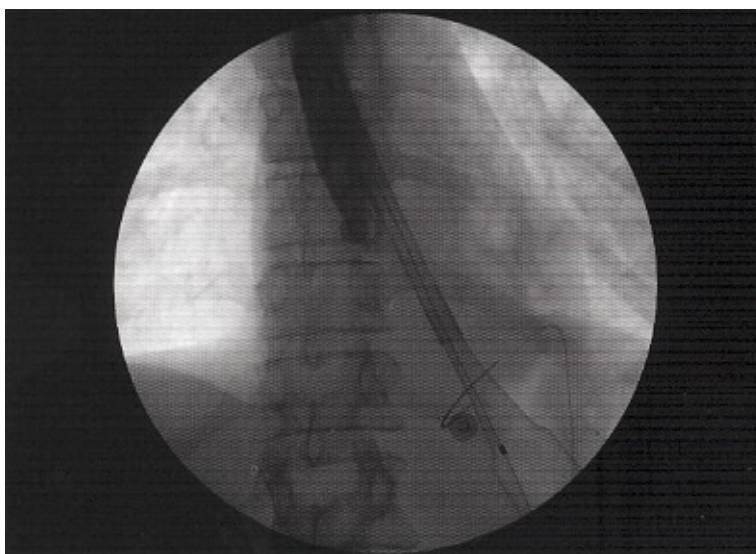

Имплантация

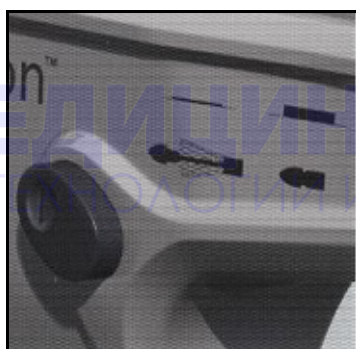

Закрытие

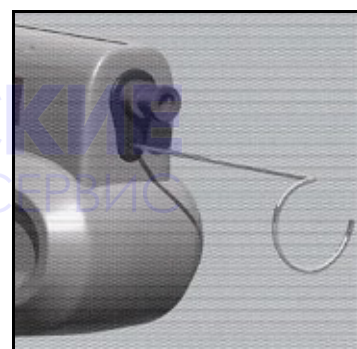

Высвобождение

Характеристика продукта

Устройство предназначено для устранения дисфагии, вызванной злокачественной опухолью, либо для лечения трахеобронхального свища.

- Абсолютный контроль над процессом имплантации стента простым нажатием курка на рукоятке, с возможностью, при необходимости, его обратного закрытия
- Оригинальная конструкция позволяет подтянуть стент вверх после его раскрытия

Номер заказа	GPN	Диаметр тело	Диаметр концов	Длина стента	Доставочное устройство
EVO-20-25-8-E	G48030	20мм	25мм	8см	8мм
EVO-20-25-10-E	G48031	20мм	25мм	10см	8мм
EVO-20-25-12,5-E	G48032	20мм	25мм	12,5см	8мм
EVO-20-25-15-E	G48033	20мм	25мм	15см	8мм

